

TienDental
tiendental.com



CLARA

Alineadores Invisibles
2026



www.claralineadores.com

Combinación exclusiva diseñada por expertos ortodoncistas para movimientos dentales predecibles


Nuestros alineadores ofrecen una fuerza continua gracias al diseño de corte, al material de fabricación y a su personalización.

Corte:

CLARA presenta una línea de corte recta sobre el margen gingival, optimizando el ajuste y la retención. Este corte suave, sin festoneado, permite movimientos dentales más complejos y reduce en muchos casos la necesidad de ataches.

Material:

Los alineadores CLARA incorporan una capa elastomérica entre dos materiales resistentes de baja porosidad.

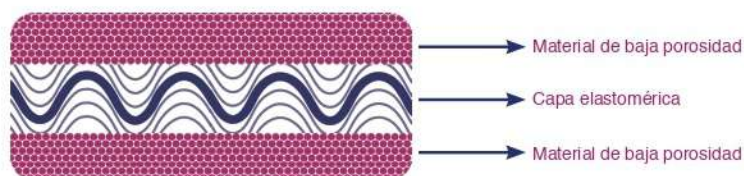

Las capas exteriores aportan rigidez y resistencia, mientras que la capa interior mantiene la forma y aplica una fuerza suave, uniforme y continua durante todo el tratamiento.

- Alta resistencia a las manchas, incluso frente a agentes como vino, café o refrescos de cola, gracias a que la capa intermedia bloquea la absorción de pigmentos.
- Aporta propiedades elásticas 3D que contrarrestan fuerzas en todas las direcciones, incluidas las rotacionales.

Personalización:

Cada paciente es único, por eso cada alineador se fabrica a medida, con opciones como:

- Recortes para elásticos
- Recortes de botón
- Recortes de ranura
- Rampas de mordida
- Ataches

Nuestros tratamientos:

FAST 10	SMART 20
10 alineadores superiores + 10 inferiores 1 refinamiento + retenedor	20 alineadores superiores + 20 inferiores 2 refinamientos + retenedor
ILIMITADO	
Alineadores superiores e inferiores ilimitados Refinamientos + retenedor	

Planificación integrada en el coste de los tratamientos.

CLARA Portal - control total para el odontólogo:

Un sistema diseñado para que el ortodoncista trabaje con **precisión, rapidez y máxima seguridad**, desde la carga de archivos hasta la entrega del tratamiento.

1. Gestión integral y seguimiento en tiempo real:

- Panel único para crear, enviar y supervisar todos los casos.
- Estado del tratamiento visible al momento: en revisión, plan aprobado, en producción o en envío.
- Historial completo para refinamientos o reposiciones sin perder información.

2. Carga de archivos avanzada:

- Subida directa de modelos 3D en formato abierto (STL, PLY, OBJ, DCM), fotografías y radiografías.

3. Visualización 3D interactiva:

- Previsualización de modelos antes de enviar.
- Herramientas para medir, rotar y evaluar contactos oclusales.
- Simulación del plan de tratamiento para validar movimientos antes de aprobar.

4. Planificación colaborativa:

- Comunicación directa con el equipo técnico dentro del portal: chat, comentarios y revisión de propuestas.
- Posibilidad de solicitar ajustes de manera ágil y aprobar en tiempo real.
- **Doctor Pro.** Videollamada de 15 min con un ortodoncista para comentar dudas sobre la planificación.

5. Seguridad y cumplimiento legal:

- **Encriptación de datos** y servidores en la UE para cumplir con GDPR/LOPD.
- Acceso protegido con doble verificación.
- Trazabilidad total: cada acción queda registrada.

6. Experiencia de usuario superior:

- Interfaz clara, rápida y optimizada para clínica.
- **Proceso guiado, paso a paso**, que evita omitir datos esenciales.
- **Multidispositivo:** ordenador, tablet o móvil para trabajar desde cualquier lugar.

¡Descubre cómo CLARA puede transformar la sonrisa de tus pacientes!



CLARA

Alineadores Invisibles



Flujo de trabajo:

Un proceso sencillo, personalizado y de alta calidad.

1. Contáctanos

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de tu distribuidor, visitando nuestra web www.claralineadores.com o enviando un correo electrónico a info@claralineadores.com.

2. Sube tu caso a nuestro portal

Regístrate con el código de tu distribuidor y sube la información necesaria de tus pacientes, escáner, fotos, indicaciones técnicas del tratamiento, etc.

3. Planificación en 48/72 horas

Recibirás una planificación detallada en menos de 72 horas. Gracias a nuestro software avanzado, nuestros ortodoncistas diseñan tratamientos precisos y eficaces.

4. Producción

Una vez aprobado el tratamiento, fabricamos los alineadores con tecnología alemana de última generación.

5. Envío rápido y seguro

Envío en 7-10 días laborales a partir de la aceptación del tratamiento. Te enviaremos los alineadores directamente a tu clínica, monitoriza tu envío en la plataforma.

6. Asistencia personalizada*

Si necesitas ajustes, soporte técnico o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de especialistas estará disponible para ayudarte. Escríbenos en el chat de la plataforma y te contestamos en menos de 2 horas en horario de oficina.

**Si necesitas ayuda con tu primer caso, solicita tu formación completamente gratuita al email training@claralineadores.com y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo.*



TienDental
tiendental.com

www.claralineadores.com